

בדיקת דם סמזי בצואה

Eiken של חברת FIT





אנא קראו בעיון
את הוראות
השימוש.

הוראות איסוף הצואה:

1. פתח את המכסה הירוק תוך סיבוב המכסה לימין ומשוך כלפי מעלה.

2. טבול קלות את קצה המקלון בעל החריצים בצואה.

3. הכנס את מקלון הבדיקה בזהירות לתוך המבחנה וסובב את המכסה הירוק עד לסגירה מלאה.
נער את המבחנה כשהיא סגורה.

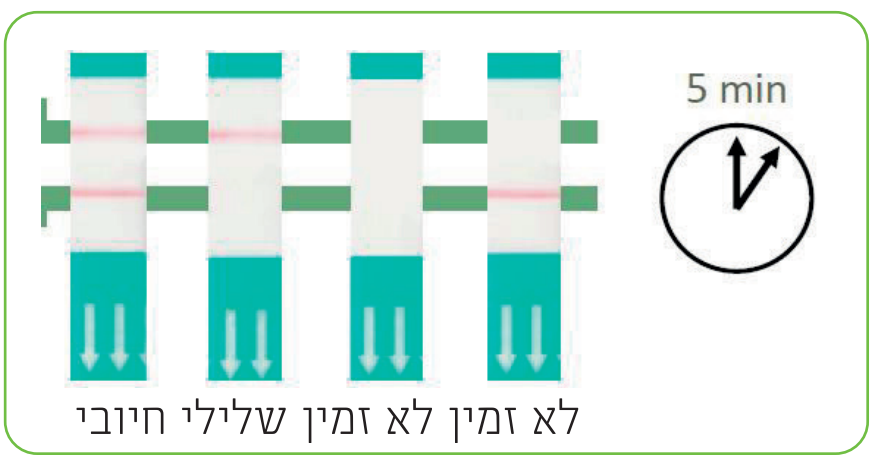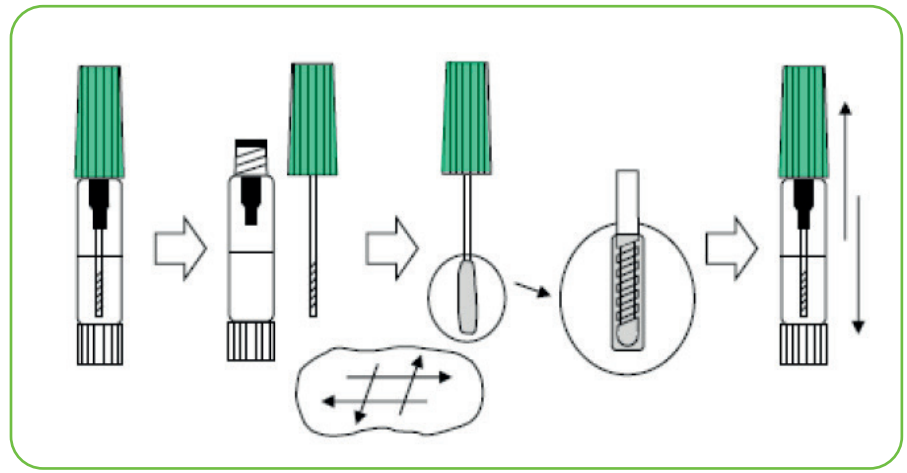

1. הוצא את המכסה הלבן של המבחנה.

2. הכנס את סטיק הבדיקה לתוך המבחנה (שים לב לכיוון החיצים כלפי מטה)

3. המתן 5 דקות וקרא את התוצאות.

הוראות לאתר איסוף הצואה: